

Polident®

MATERIAL PARA COROAS E PONTES PROVISÓRIAS

INTRODUÇÃO

A resina Polident para coroas e pontes, polimeriza rapidamente em apenas 5 minutos, formando um acrílico duro, resistente e de fácil acabamento.

INSTRUÇÕES DE USO

Polident é uma resina autopolimerizável, apresentada em forma de pó e líquido. O pó é polimetacrilato de metila e o líquido, monômero metacrilato de metila. A proporção de mistura é 3 partes de pó para 1 parte de líquido em volume; 20 g de pó para 10 mL de líquido por peso.

1. Fazer a moldagem usando alginato, borracha, silicone ou hidrocolóide. Manter a moldagem úmida.
2. Complete todos os preparos e então isole os dentes com vaselina ou silicone lubrificante.
3. Seque a moldagem totalmente. Aplique líquido suficiente diretamente à moldagem usando conta gotas e adicione o pó. Dispense o pó diretamente do frasco plástico com cuidado até que o líquido seja absorvido. Pode-se adicionar mais líquido e pó se necessário. Para coroas temporárias, usando pré-formados, preencha a forma até a metade com o líquido e adicione o pó até que o líquido seja absorvido.
4. Após preenchimento da forma ou da moldagem com resina Polident, aguarde 1 minuto até que o material perca o brilho. Recoloque na boca em posição apropriada. O tempo de trabalho é de 3 minutos do início da mistura. A moldagem pode então ser removida da boca sem que distorça. Complete o endurecimento deixando sobre a bancada para secagem em até 6 minutos do início da mistura.
5. Remova a resina Polident da moldagem ou da coroa pré-formada e retire o excesso. A coroa ou ponte provisória pode receber acabamento e polimento com pedras abrasivas ou brocas de carbide e instrumentos convencionais para polimento de compósitos e então cimentadas ao preparo.

PRECAUÇÕES:

- Os tecidos gengivais circundantes devem ser protegidos da resina Polident.
- Dentina vital exposta também deve ser protegida da resina Polident.
- Pode causar irritação na pele.
- Utilize com ventilação adequada.

Reposições individuais podem ser adquiridas no fornecedor habitual.

Resp. Tec.: Adilson Bellato Junior
CRQ 04162921

Reg Anvisa 10215449018

Fabricado por

 **POLIDENTAL**

CNPJ 48.875.447/0001-30
Rua Philip Leiner, 350 - Cotia/SP
SAC 0800 142999
www.polidental.com.br