

Polident[®]

POLIDENT - RESINA PARA PADRÕES DE INCRUSTAÇÕES (*Técnica do Pincel*)

- Proporciona as margens mais precisas
 - Queima mais limpa
 - Poupa tempo
-

TÉCNICA DO PINCEL PARA CONFECÇÃO DE PADRÕES PRECISOS

INSTRUÇÃO DE USO

TÉCNICA DIRETA:

1. Coloque uma pequena porção de pó Polident num pote dappen, depois adicione cerca de 6 gotas de líquido Polident em um outro.
2. Seque a cavidade do dente com um jato de ar e aplique uma camada fina do lubrificante que acompanha o estojo, para facilitar a remoção do padrão. Retire o excesso.
3. Mergulhe um pincel pequeno no líquido e depois no centro do pó, sem tocar no pote dappen, para fazer uma pequena bola na ponta do pincel. Aplique na base da cavidade. Se esta mistura estiver muito espessa, mergulhe o pincel outra vez no líquido e aplique-o sobre a mistura na cavidade.
4. Depois que o fundo da cavidade estiver recoberto use um pincel maior, da mesma forma, para pegar quantidades maiores e preencher o restante do preparo. A resina Polident flui e seu acomodamento pode ser controlado e dirigido com o pincel para formar o molde.
5. Quando o padrão estiver polimerizado, isto é, 2 minutos depois da aplicação da última camada, verifique a mordida, corrija as margens. Faça a escultura como desejar, dentro ou fora da boca, com uma broca, disco abrasivo ou roda de borracha.
6. Para fundir, cole um conduto com cera, inclua e elimine o padrão normalmente. O padrão de Polident irá se volatilizar em 40 minutos, a 400°C., sem deixar resíduo.

TÉCNICA INDIRETA:

A técnica de pincel Polident é igualmente rápida e precisa para a confecção de padrões de incrustações ou pontes, na técnica indireta sobre modelos de gesso, revestimento ou amálgama. Passe o lubrificante no modelo e aplique da mesma forma da técnica direta.

- Matrizes – Tiras de aço:

Recomenda-se o uso de matrizes em M.O.D. coroas $\frac{3}{4}$ e coroas totais. A matriz pode ser facilmente destacada quando a resina Polident estiver endurecida. Dê a forma desejada ao padrão, recoloque-o em posição para examinar e então adicione os pontos de contato.

- Técnica de compressão:

Faça uma mistura bem fina usando porções aproximadas de pó e de líquido Polident espatulando numa placa de vidro ou misturando em um dappen. Na cavidade provida de matriz, insira o material usando um instrumento. Cubra com celofane ou folha de estanho e faça com que o paciente oclua firmemente. Mantenha em posição até que o padrão endureça depois o remova do dente e dê a forma desejada.

- Uso de cera:

Pode-se corrigir ou adicionar pontos de contato e faces oclusivas com cera para incrustações após o endurecimento da resina Polident. A cera pode também ser usada em coroas $\frac{3}{4}$ ou totais, faces linguais e oclusais e para verificação das margens.

- Retenções:

No caso de retenções, para remover o padrão, é necessário cortá-lo longitudinalmente com uma broca ou um disco e reconstruí-lo fora da boca ou do molde.

- Manuseio:

Como o líquido Polident evapora-se durante o processo de aplicação, a resina forma um padrão denso e preciso em que se pode dar acabamento, manusear e incluir sem receio de quebras ou distorções por mudança de temperatura. Um padrão confeccionado com resina Polident é virtualmente indeformável.

- Dentes plásticos:

Não há necessidade de uso de folha de estanho ou celofane, como separador, exceto em caso de mordida com antagonista plástico ou quando se usa a técnica da compressão.

- Dentes superiores:

Para dentes superiores é melhor começar a aplicação na parte gengival do preparo. Haverá material o bastante para aderir à secção gengival e formar uma base que permita acrescentar camadas adicionais.

- Tempo de tratamento:

Cada camada de Polident aplicada endurece rapidamente; assim; as aplicações iniciais estarão polimerizadas durante a aplicação das camadas subsequentes. O pré-aquecimento do pó acelerará o endurecimento e o seu resfriamento retardará. O tempo de aplicação completo deverá ser o de aproximadamente 5 minutos, depois da familiarização com a técnica e manuseio. As incrustações feitas com padrão em resina Polident poupam considerável tempo no acabamento.

Reposições individuais podem ser adquiridas no fornecedor habitual.

Resp. Tec.: Adilson Bellato Junior
CRQ 04162921

Reg Anvisa 10215449018

Fabricado por

 **POLIDENTAL**

CNPJ 48.875.447/0001-30
Rua Philip Leiner, 350 - Cotia/SP
SAC 0800 142999
www.polidental.com.br